



Instructions pour le
téléchargement et l'installation
des librairies Ziacom pour
3shape 

Télécharger le software

Depuis votre ordinateur, ouvrez le navigateur et saisissez l'adresse URL suivante : www.ziacom.com

Dans le menu FLUX NUMÉRIQUE, cliquer sur l'option Bibliothèques CAD/CAM > sélectionner 3Shape.

Cliquez sur **3shape** 

Un fichier dénommé 3Shape.zip sera téléchargé dans le dossier Téléchargements de votre ordinateur.

Décompresser le fichier

Ouvrez le dossier Téléchargements de votre ordinateur et décompressez le fichier dénommé

3Shape.zip.

Pour décompresser le fichier, vous pouvez utiliser un décompresseur standard téléchargé sur Internet comme 7-zip.

Après décompression du fichier, un dossier avec le contenu suivant s'affichera :

- ZIACOM_D.IMPLANT(+0.05)_1.0.dme
- ZIACOM_D.IMPLANT(+0.10)_1.0.dme
- ZIACOM_D.IMPLANT(+0.15)_1.0.dme
- ZIACOM_D.IMPLANT(-0.05)_1.0.dme
- ZIACOM_D.IMPLANT_1.0.dme
- ZIACOM_TIBASE(+0.05)_2.1.dme
- ZIACOM_TIBASE(+0.10)_2.1.dme
- ZIACOM_TIBASE(+0.15)_2.1.dme
- ZIACOM_TIBASE(-0.05)_2.1.dme
- ZIACOM_TIBASE_2.1.dme

Importation de bibliothèques


1. Ouvrez le Panneau de Contrôle de 3Shape depuis l'accès direct ou depuis Dental Manager (icône de la vis dans les deux cas).



2. Cliquez ensuite sur l'option « Importar/Exportar » (Importer/Exporter) dans le menu « Herramientas » (Outils)




- Dans cette section, cliquez sur le bouton « Importar materiales » (Importer matériels)

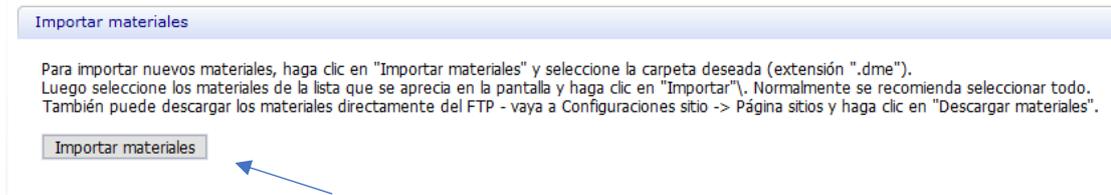


- Maintenant, sélectionnez le fichier dont vous avez besoin dans le dossier décompressé que vous avez téléchargé.

	ZIACOM_D.IMPLANT(+0.05)_1.0.dme	28/11/2022 9:14	Archivo DME	4.246 KB
	ZIACOM_D.IMPLANT(+0.10)_1.0.dme	28/11/2022 9:15	Archivo DME	4.246 KB
	ZIACOM_D.IMPLANT(+0.15)_1.0.dme	28/11/2022 9:17	Archivo DME	4.247 KB
	ZIACOM_D.IMPLANT(-0.05)_1.0.dme	28/11/2022 9:18	Archivo DME	4.247 KB
	ZIACOM_D.IMPLANT_1.0.dme	28/11/2022 9:12	Archivo DME	4.249 KB
	ZIACOM_TIBASE(+0.05)_2.1.dme	28/11/2022 9:22	Archivo DME	20.801 KB
	ZIACOM_TIBASE(+0.10)_2.1.dme	28/11/2022 9:23	Archivo DME	20.697 KB
	ZIACOM_TIBASE(+0.15)_2.1.dme	28/11/2022 9:25	Archivo DME	20.699 KB
	ZIACOM_TIBASE(-0.05)_2.1.dme	28/11/2022 9:26	Archivo DME	20.698 KB
	ZIACOM_TIBASE_2.1.dme	28/11/2022 9:20	Archivo DME	20.707 KB

- Après l'avoir sélectionné, la fenêtre suivante s'affichera. Cliquez sur le bouton « Importar » (Importer).

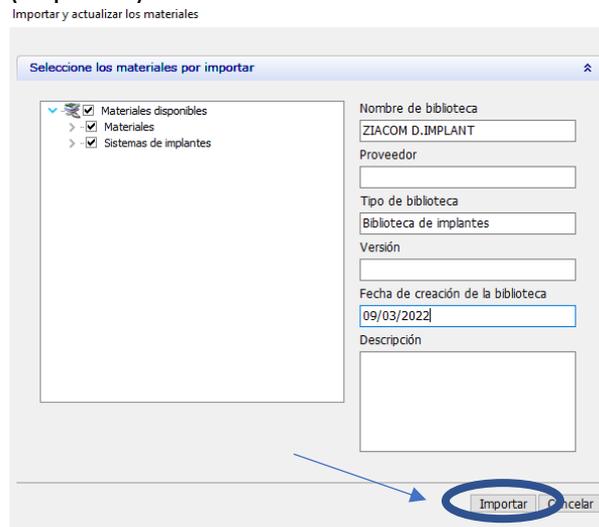

- À la fin du processus, une fenêtre s'affichera. Sélectionnez le bouton « Aceptar » (Accepter).

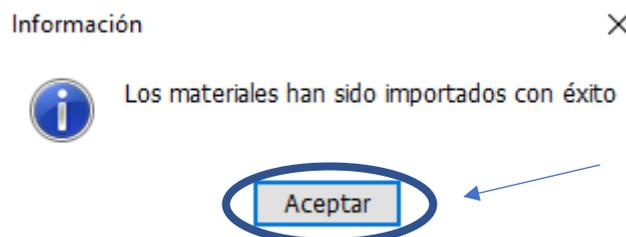

7. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton garder sur la partie supérieure gauche de l'écran (icône du disque).



8. Dans la fenêtre suivante, cliquez sur « Sí » (Oui) pour confirmer que vous gardez le fichier.

Confirmar guardar

